

Come formare il paradenti Game Guard per adulti o bambini:


Avvertenza:

Acqua bollente, i minori devono essere sorvegliati in ogni momento.



1 Formare il paradenti


- a. Riempire un contenitore adatto con acqua bollente e lasciare raffreddare per **30 secondi**.

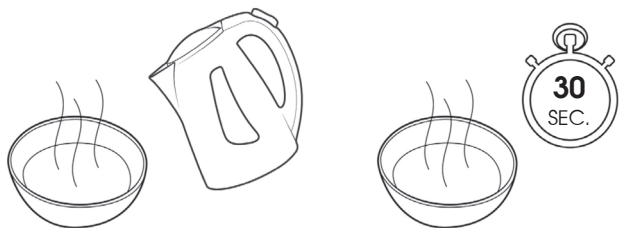

- b. Mettere il paradenti nell'acqua per **40 secondi**. **Non superare questo tempo**. Rimuovere con un utensile adatto.




- c. Il paradenti dovrebbe apparire morbido e malleabile. In caso contrario rimetterlo in acqua per altri 10 secondi. **Nota:** se l'acqua si è raffreddata troppo, il paradenti non risulterà abbastanza morbido da poter essere modellato; se non si riesce a modellarlo, rimetterlo in acqua appena bollita.

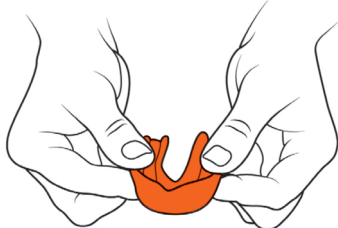

- d. Prima di modellarlo, lasciate raffreddare il paradenti adeguatamente. Posizionare con attenzione il paradenti intorno ai denti superiori, mordere fermamente risucchiando con forza e usare le dita per premere i bordi del paradenti nei denti e nelle gengive. **Continuare questo procedimento per 30 secondi**.

- e. Rimuovere il paradenti e raffreddare sotto acqua fredda corrente per **60 secondi**. Il paradenti deve essere freddo prima di rimetterlo in bocca.

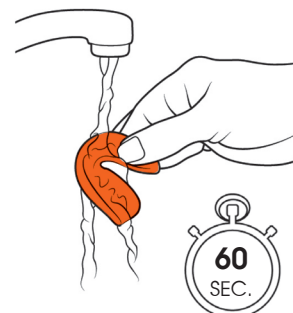

- f. Riposizionare il paradenti in bocca e verificare l'aderenza e la tenuta. Il paradenti non dovrebbe cadere da solo e dovrebbe risultare confortevole; in caso contrario, è possibile ripetere i passaggi precedenti.

Se dopo aver ripetuto il processo di modellamento si avverte ancora disagio, non usare.

2 Avvertenze importanti

- Non masticare il paradenti.
- Non indossare il paradenti se mostra segni di usura, crepe o rotture; in questo caso, smaltire il paradenti e sostituirlo con uno nuovo.
- Non permettere a nessun'altra persona che non sia il proprietario di usare il paradenti.
- Non esporre il paradenti a calore estremo o alla luce diretta del sole, conservarlo sempre nella scatola quando non viene utilizzato.
- Per i genitori - controllare regolarmente l'adattamento del paradenti dei propri figli per assicurarsi che non interferisca con lo sviluppo della bocca e dei denti.
- Se si ha un apparecchio o un altro dispositivo montato sui denti, si consiglia di consultare il proprio dentista o ortodontista in merito all'idoneità del paradenti. Non indossare mai un paradenti con un apparecchio a meno che non sia stato approvato dalla persona che applica l'apparecchio.
- I paradenti devono essere usati solo come dispositivi di protezione personale e non devono essere utilizzati per altri scopi, come un dispositivo antirussamento o un dispositivo per prevenire il digrignamento dei denti.

3 Conservazione del paradenti:

- Pulire sempre il paradenti con acqua fredda dopo l'uso
- Non usare collutori, dentifrici o altri detergenti
- Pulire la scatola del paradenti con acqua calda Assicurarsi sempre che il paradenti sia asciutto prima di riporlo nella scatola
- Conservare sempre il paradenti nella sua scatola quando non viene utilizzato
- Scrivere il nome dell'utente in modo indelebile sulla scatola del paradenti

Nel caso in cui sia necessario restituire il paradenti, assicurarsi che venga restituito nella sua confezione originale, insieme a tutta la documentazione. Ogni scatola del paradenti è contrassegnata con il numero di lotto del fabbricante per facilitarne la rintracciabilità.

I paradenti sono stati testati in conformità con BSI DD 253:2001 e sono completamente conformi alla normativa CE; una copia del nostro certificato è disponibile per il download dal nostro sito web.

GAME GUARD fa parte della Paul Norman Plastics Limited
Paul Norman Plastics LTD., Unit S5, Inchbrook Trading Estate, Bath Road, Woodchester, Stroud, Gloucestershire, GL5 5EY

www.game-guard.co.uk E-mail: enquiries@pnplastics.co.uk
Tel: 01453 833 388